

ELECTROTHERAPIE - INDICATIONS, CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

Indications pour les formes d'ondes prémodulées, l'IFC 2 pôles, l'IFC 4 pôles, le courant pulsé à haute tension, TENS, russe, VMS

- Relaxation des spasmes musculaires
- Prévention ou retardement de l'atrophie par inaction
- Augmentation de la circulation sanguine locale
- Rééducation musculaire
- Préserver ou accroître l'amplitude des mouvements

Indications supplémentaires pour les formes d'ondes TENS, VMS™, prémodulées, IFC 2 pôles, IFC 4 pôles, micro-courant

- Soulagement symptomatique des douleurs réfractaires, chroniques
- Douleur aiguë post-traumatique
- Douleur aiguë post-chirurgicale

Indications pour le mode continu galvanique

- Relaxation des spasmes musculaires

Contre-indications

- Cet appareil ne doit pas être utilisé pour soulager les douleurs locales symptomatiques à moins que l'étiologie ne soit établie ou qu'un syndrome de douleur n'ait été diagnostiqué.
- Le présent appareil ne doit pas être utilisé lorsque la zone de traitement présente des lésions cancéreuses.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé lorsque la zone de traitement présente des blessures ouvertes.

- Les autres contre-indications sont les suivantes : les patients suspectés d'être porteurs d'une maladie infectieuse grave et/ou d'une maladie où il est recommandé, à des fins médicales générales, de supprimer la chaleur ou la fièvre.
- Il convient d'éviter de positionner des électrodes qui appliquent du courant dans la région du sinus carotidien (partie antérieure du cou) ou transcérébralement (au travers de la tête).
- La sécurité de la stimulation électrique thérapeutique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- Les stimulateurs musculaires électriques ne doivent pas être utilisés sur les patients qui ont des pacemakers.
- Il est interdit d'utiliser les formes d'ondes TENS sur les patients qui ont des pacemakers.

Précautions supplémentaires

- Il convient de prendre des précautions avec les patients qui sont diagnostiqués ou suspectés de problèmes cardiaques.
- Il convient de prendre des précautions avec les patients qui sont diagnostiqués ou suspectés d'épilepsie.
- Il convient de prendre des précautions en présence des éléments suivants :
 - » Lorsqu'il y a une tendance manifeste à l'hémorragie suite à une fracture ou un traumatisme aigu
 - » suite à une intervention chirurgicale récente lorsque la contraction musculaire peut gêner le processus de cicatrisation
 - » sur l'utérus en gestation ou présentant des menstruations
 - » sur des zones cutanées qui sont dépourvues de sensations normales.

