



Notre « COMBYDRAP » n'est pas concerné par la décision prise le 25 juillet 2017 par l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé) par l'arrêt de l'utilisation du dispositif de couchage sécurité, commercialisé par une société concurrente.

Notre « COMBYDRAP » est une alternative au produit cité ci-dessus et en aucun cas il n'a été créé pour le remplacer. C'est une approche différente, une contention plus souple où les patients peuvent se mouvoir aisément, sa souplesse est due au tissu employé : 50% COTON - 50% POLYESTER.

AVERTISSEMENT :

C'est pourquoi nous vous demandons de **CIBLER PARFAITEMENT LE PATIENT UTILISATEUR, NE PAS UTILISER** notre **COMBYDRAP** sur des **PERSONNES AGITÉES, TRÈS AGITÉES, VOIRE DÉSORIENTÉES.**

Le non-respect de nos consignes d'utilisation relève de la responsabilité du prescripteur.

Conclusion, afin d'éviter tout incident nous vous conseillons fortement de faire un test.

ATTENTION :

- CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA PSYCHIATRIE
- NE PAS UTILISER EN DESSOUS DE LA TAILLE 38/40
- NÉCESSITE UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE DU PATIENT
- LE PERSONNEL DE SANTÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT S'ASSURER APRÈS INSTALLATION DU COMBYDRAP QUE LE PASSAGE DE TÊTE PAR L'ENCOLURE EST IMPOSSIBLE. AUQUEL CAS LE COMBYDRAP N'EST PAS ADAPTÉ À LA TAILLE DU PATIENT UTILISATEUR

Ce « COMBYDRAP » a été étudié pour éviter les chutes du lit des patients.

Simple d'installation, houssez le matelas (comme un drap housse) avec la tête et le pied du sommier et sanglez en dessous le sommier ; fermeture par boucles réglables - photo A.

Réalisé dans un tissu de qualité, sa souplesse et son extensibilité permettent au patient de pouvoir s'asseoir dans leur lit ; grâce à l'aisance du bonnet - photo B, sans accéder à l'ouverture de la fermeture à glissière.

Le système de fermeture a été élaboré de telle façon que le patient ne puisse l'ouvrir :

- Fermeture de haut en bas - photo C et D
- Protection au départ de l'encolure - photo E et F
- Cache fermeture - photo G et H
- Verrouillage possible de la fermeture par une clé magnétique - photo I

Deux petites ouvertures sur le côté pour le passage de sondes ou autres - photo J



Utilisation des barrières de sécurité impérative.

COULEURS :
VERT D'EAU



- Taille : unique
- Tissu : 50 % coton - 50 % polyester.

- Epaisseur tissu : 220 g
- Lavage : 90°C - Laver impérativement avec fermeture à glissière fermée

